


Ruma Digital-System

1. Viestit


- ”Viestit”-painikkeesta pääset lukemaan lääkärisi sinulle lähettämiä viestejä.
- Muista tarkistaa säännöllisesti, onko lääkärisi lähettänyt sinulle viestejä.
- Varmista lisäksi, että push-viestit on sallittu, jotta saat viestit silloinkin, kun sovellus on pois päältä.
- Viestit, joita ei ole luettu, näytetään lihavoidulla fontilla.
- Yleisesti ottaen lääkärisi voi lähettää sinulle kahdenlaisia viestejä: pyynnön nauttia markkeri ja ottaa virtsanäyte seuraavien 12 tunnin aikana tai soittopyynnön.

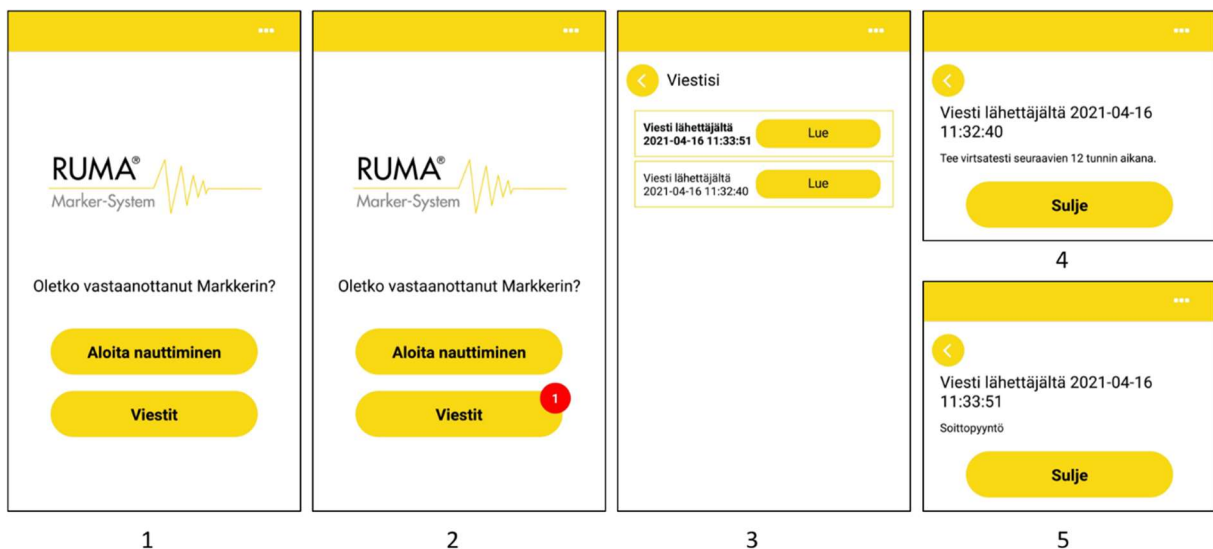

1. Aloitus sivu lääkärin tablettiin linkittämisen jälkeen. 2: Ilmoitus uudesta viestistä. 3: Viestien yhteenvetönäkymä. 4: Pyyntö ottaa markkeri ja kerätä virtsanäyte. 5: Soittopyyntö.

2. Esittelyvideo

- Ottaaksesi markkerin tai aloittaaksesi kuvaamisen valitse ”Aloita nauttiminen”.
- Sinulle näytetään esittelyvideo, jossa käydään läpi markkerin nauttiminen. Video on ladattava kertaalleen ennen sovelluksen käyttämistä.
- Videota ei voi ohittaa sovelluksen ensimmäisellä käynnistyskerralla. Seuraavilla käynnistyskerroilla videon voi ohittaa painamalla ”Seuraava”.

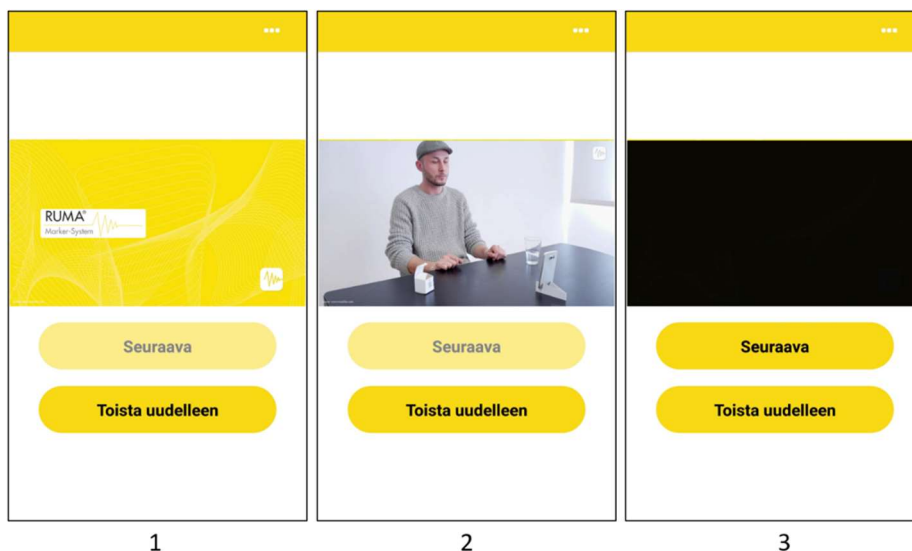

1: Esittelyvideo toistetaan automaattisesti, kun "Aloita nauttiminen" valitaan; 2: Markkerin nauttimisen esittelyvideo; 3: Sinun on katsottava video kokonaan ainakin kerran, ennen kuin voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

3. QR-koodien skannaaminen

- Videonauhoituksen aloittamiseksi on skannattava merkkikapselin ulko- ja sisäpakkauksen QR-koodit.
- Skanna QR-koodit peräkkäin älypuhelimesi takakameralla.
- Vihreä merkki vahvistaa QR-koodien oikeellisuuden.

Ulommassa pakkauksessa olevan QR-koodin skannaus ei onnistu tai koodia ei hyväksytä

Syy	Ratkaisu
Yrität skannata koodia väärällä kameralla.	Käytäthän skannaamiseen puhelimen takakameraa.
Valaistusolosuhteet eivät sovellu QR-koodin skannaamiseen.	Varmista, että tilassa on tarpeeksi valoa, ja skanna koodi uudelleen.
<ul style="list-style-type: none"> • QR-koodi on tuhoutunut sen jälkeen, kun lääkäri liitti sen sinuun. • Olet saanut markkerin, jota lääkäri ei ole liittännyt sinuun. 	Ota yhteyttä lääkäriisi ja palauta markkeri. Saat lääkäriltäsi uuden markkerin. Jos sinulla on toinen markkeri, käytä sitä virtsanäytteen keräämiseen.

Sisemmässä pakkauksessa olevan QR-koodin skannaus ei onnistu tai koodia ei hyväksytä.

Syy	Ratkaisu
Yrität skannata koodia väärällä kameralla.	Käytäthän skannaamiseen puhelimen takakameraa.
Valaistusolosuhteet eivät sovellu QR-koodin skannaamiseen.	Varmista, että tilassa on tarpeeksi valoa, ja skanna koodi uudelleen.
<ul style="list-style-type: none"> QR-koodi on vaurioitunut. Sisemmän pakkauksen QR-koodi ei vastaa ulomman pakkauksen QR-koodia. 	Jos QR-koodia ei skannata 10 sekunnin kuluessa, näkyviin tulee painike, jossa lukee ”QR-koodin skannaus ei onnistu?” Paina tätä painiketta avataksesi tekstikentän, johon voit syöttää RMB-koodin (QR-koodin yläpuolella). Jos prosessi ei edelleenkään toimi, ota yhteyttä lääkäriisi ja palauta kyseessä oleva markkeri. Saat lääkäritäsi uuden markkerin. Jos sinulla on toinen markkeri, käytä sitä virtsanäytteen keräämiseen.

4. Markkerin nauttiminen

Noudata jokaisen markkeripakkauksen mukana toimitettavaa nauttimisohjetta. Markkeri on nautittava juuri niin kuin ohjeessa neuvotaan. Mikä tahansa ohjeista poikkeaminen voi johtaa virheelliseen ja siten hylättyyn markkerin nauttimiseen.

5. Nauttimisvideon lähettäminen

- Kun kuvaaminen lopetetaan, video salataan automaattisesti.
- Tämän jälkeen video on lähetettävä lääkäriille. Lähettääksesi videon valitse ”Siirrä nyt”.
- Vihreä symboli kertoo siirron onnistuneen.
- Videon kuvaamisprosessi on nyt valmis. Valitse ”Valmis”.



1: Nauttimisvideon salaus. 2: Videon lähetyspyyntö. 3: Videon siirto. 4: Onnistuneen siirron vahvistus.

Tuki

Jos sovelluksen käytössä esiintyy ongelmia, olethan yhteydessä lääkäriisi tai

Ruma GmbH
Aachener Str. 338
D-50933 Köln

Puhelin: +49 221/ 3990 11 0
Faksi: +49 221/ 3990 11 20
Sähköposti: info@marker-test.de
Verkkosivut: www.marker-test.de